



# Betafine Einmal-Penkanüle



- Einmal-Penkanüle
- einfache und sichere Handhabung
- UNIVERSAL – Passend für alle gängigen Injektions-Pens
- 8 mm
- 100 Stk./Packung
- PZN 11537950



1 Entfernen Sie die Kappe der Betafine-Penkanüle.



2 Bilden Sie eine Hautfalte und stechen Sie die Nadel senkrecht ein. Drücken Sie den Dosierknopf langsam durch und halten Sie ihn 10 Sekunden gedrückt.



3 Die Nadel ist nach dem Spritzen sicher.



4 Entsorgen Sie die Betafine-Penkanüle in einem geeigneten Sicherheitsbehälter.