



MEDICO FINE®


Lanzetten



- sterile Einmal-Lanzette
- 29G/1,5 mm
- 0,5 mm Durchmesser
- 100 Stk/Packung
- PZN 12481134



Einfache Handhabung dank gebogenem, geripptem Aktivierungs-Knopf für komfortable Fingerablage. Ergonomische V-Form für festen Halt. Mit Gammastrahlen sterilisierte Nadel. Sichere Einmalbenutzung. Patientenfreundlich durch ultra scharfe, dünne, silikonbeschichtete Nadel.

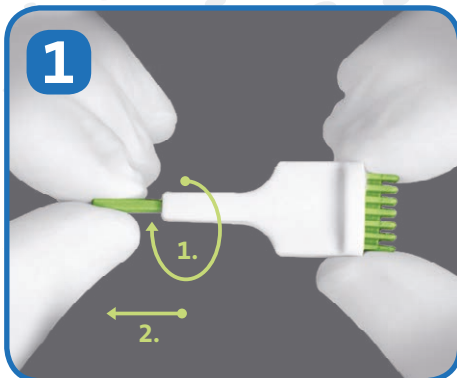

1 Sicherheitskappe abdrehen und gerade herausziehen.



2 Lanzette fest an die Anstichstelle setzen und auslösen.



3 Sanft mit kurzen Unterbrechungen neben die Einstichstelle drücken, um die gewünschte Blutmenge zu erhalten.